

My Nightingale (マイ ナイチンゲール) 新サービス開始について

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
この度、My Nightingale (マイナイチンゲール) の新サービス開始について、下記の通りご案内いたします。
健康と医療の未来に貢献すべく、より良い検査サービスのご提供に努めてまいります。
謹白

記

■ 対象項目 OG18 2 My Nightingale (マイ ナイチンゲール)

■ 内容

- iOSおよびAndroid対応のモバイルアプリケーションが検査委託先の株式会社ウェルタスよりリリースされ、委託先の報告書上(P.1)に記載された二次元バーコードを用いて検査結果を取り込み、スマートフォン上に表示することが可能となりました。
複数回、検査を受診された方は前回の検査結果との改善度合いを比較できます。
なお、検査内容および報告書等の変更はありません。



アプリケーションのインストールはこちら



左の二次元バーコードをスマートフォンで読み込み、アカウントを作成

↓
報告書P.1に記載された二次元バーコードをアプリケーションで読み取る



My Nightingale™ (マイ ナイチンゲール)

My Nightingale™ (マイ ナイチンゲール) は、プロトン核磁気共鳴 (NMR) 分光法を用いて250項目の血清中バイオマーカーを測定し、得られた測定値からNightingale Health社が開発した総合健康指標 (ナイチンゲールヘルススコア) および各種健康指標 (炎症スコア/コレステロールバランススコア/脂肪酸バランススコア/糖尿病耐性スコア/心臓年齢/心血管疾患リスク/2型糖尿病リスク) を算出し、総合的な健康状態を把握するための検査です。

▼検査要項

検査項目名	My Nightingale (マイ ナイチンゲール)
項目コード	OG18 2
検体量	速やかに遠心 血清 1.0 mL
容器	S09 →A00 (X) ポリスピッツ
保存方法	必ず凍結保存してください
所要日数	14~28 日
検査方法	プロトン核磁気共鳴 (NMR) 分光法
基準値	
報告範囲 (単位)	SRL NEWS No.2022-21参照
桁数	SRL NEWS No.2022-21参照
備考	重 検体の取り扱い方法は下記をご参照ください。 本項目は株式会社ウェルタスへ委託し、Nightingale Health Japan株式会社にて測定・解析することで総合的な健康状態を把握するための検査です。本検査は特定の病気の診断をするものではありません。 &Y (Nightingale Health Japan株式会社)

●受託における注意点

- 空腹時採血による検査です。採血前4時間以上の絶食をお願いします。
検査当日に食事をする場合は、脂質の多い食事や食べ過ぎに注意してください。
- 本検査結果は受診者の血液から測定したバイオマーカー (血液中に含まれる様々な成分) を分析することで、集団における統計的な傾向や、測定値が受診者と同様の人の結果を示すことを目的としており、受診者の健康状態や体質、病気を診断するものではありません。
- 現在妊娠中の方、病気をお持ちの方、治療中・投薬中の方は正確な結果が得られない可能性があります。
- 本検査のバイオマーカー測定結果は既存測定方法と同じ値にならない可能性があります。
- 他項目との重複依頼は避けてください。
- 強溶血検体や指定容器以外で採血された検体の受託はできません。
- ご依頼の際は採取日、年齢、性別を必ず記載してください。

●検体のお取り扱いについて

- 指定の採血容器に 5mL 程度を採血し、4~5 回転倒混和してください。
- 採血後、1 時間以内に遠心分離 (15~20℃で 1500G、10 分以上) し、血清 1.0mL を分注してください。
※分離剤入り採血管で遠心分離した際は、室温保管 (9-25℃) の場合 8 時間以内、
冷蔵保管 (0-8℃) の場合 24 時間以内に分注してください
- 分注後、直ちに凍結してご提出ください。

※項目コードの詳細およびバイオマーカー測定値より算出される総合健康指標および各種健康指標、各種健康指標及び総合健康指標の判定基準については、SRL NEWS No.2022-21をご参照ください